

Merci d'avoir choisi wurmCHECK; dans l'intérêt de votre animal. Envoyez-nous l'échantillon de selles de votre animal et nous vous dirons si une vermifugation est recommandée ou si vous pouvez y renoncer, ce grâce à un test diagnostique des plus modernes!

Rapide, précis, simple:

1. Servez-vous du tube d'échantillon ci-joint pour collecter l'échantillon de selles de votre animal.  
Nous vous conseillons de prendre, pendant 3 jours de suite, un échantillon (il suffit, à chaque fois, d'un échantillon de la grandeur d'un petit pois). La pelle à l'intérieur du tube d'échantillon ne doit pas être nettoyée après usage, mais peut être utilisée pour collecter les 3 échantillons.
2. Remplissez l'étiquette détachable ci-dessous à droite de manière lisible avec un stylo ou un feutre indélébile et collez-la sur le tube d'échantillon.
3. Mettez le tube avec l'échantillon des selles dans le creux de l'emballage.
4. Remplissez le formulaire ci-dessous. Détachez le formulaire et glissez-le dans le couvercle de l'emballage.
5. Collez l'étiquette de retour préaffranchie sur l'emballage.
6. Fermez l'emballage et collez le couvercle.
7. Postez le paquet dans une boîte à lettres de la Poste Suisse.



Vous recevrez le résultat de l'analyse par e-mail dans quelques jours.

Après réception de l'échantillon de selles, nous vous enverrons le résultat de l'analyse dans les 3 jours ouvrables. Si tel ne devait pas être le cas, nous vous prions de bien vouloir nous contacter: 062 211 00 00 / info@microstech.com



## Données concernant l'animal

Veillez remplir le formulaire ci-dessous. Il est important et impératif que le formulaire rempli nous soit retourné avec l'échantillon de selles. Les données des personnes et des animaux sont traitées confidentiellement. Si vous le souhaitez, nous enverrons également les résultats de l'analyse, par e-mail, à votre vétérinaire.

Animal    chien    chat

Nom: \_\_\_\_\_

Race: \_\_\_\_\_

Sexe: \_\_\_\_\_

Destiné à l'utilisation interne

Projet:

Résultat:

### Propriétaire

Nom/Prénom: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

CP / Lieu: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

téléphone: \_\_\_\_\_

### Étiquette pour tube

Nom Propriétaire:

Nom Animal:

chien

chat

### Vétérinaire

Nom/Prénom: \_\_\_\_\_

Cabinet: \_\_\_\_\_

CP / Lieu: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_